


Gebrauchsanweisung

Mit KadeFungin® Milchsäurekur wird die gynäkologische Kompetenz von Dr. Kade konsequent in ein neues Produkt für das tägliche Wohlbefinden und die Gesundheit der Frau umgesetzt. Dieses Produkt ist in Zusammenarbeit mit Frauen und ihren Ärztinnen/Ärzten und unter Beachtung unserer hohen Qualitätskriterien entstanden. Bitte lesen Sie die Hinweise aufmerksam und wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt / Ihre Ärztin oder Apotheker/in.



KadeFungin® Milchsäurekur in 7 einzeln verpackten Einmal-Applikatoren

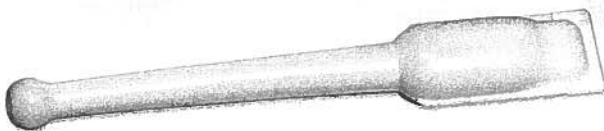

Anwendungsgebiete

Regeneration und Stabilisierung der Vaginalflora, Wiederherstellung des natürlich sauren Milieus.

Aus verschiedenen Gründen kann der pH-Wert des Scheidenmilieus aus dem Gleichgewicht geraten und sich in den basischen Bereich verschieben, z. B. durch

- eine Pilz- oder Bakterieninfektion der Vagina,
- eine allgemeine Schwäche des Immunsystems durch Krankheiten oder Stress,
- eine Umstellung des Hormonhaushaltes z. B. in der Schwangerschaft, den Wechseljahren oder auch bei hormoneller Empfängnisverhütung,
- Scheidentrockenheit,
- eine Antibiotikatherapie,
- zu intensive Intimhygiene.

In einer gesunden Vagina sorgen Milchsäurebakterien durch die Bildung von Milchsäure für ein saures Milieu. Der natürliche pH-Wert liegt dann etwa bei 4. Damit wird das Eindringen und die Vermehrung unerwünschter Keime gehemmt. Ist das Milieu nicht sauer genug, entfällt die Schutzfunktion des gesunden vaginalbereiches und es kann zu Infektionen durch Pilze und Bakterien kommen.

Als Bestandteil der KadeFungin® Milchsäurekur sorgt die Milchsäure dafür, dass das physiologische Gleichgewicht im Intimbereich wieder hergestellt wird. Der natürliche Säureschutzmantel wird regeneriert. Begleitsymptome der bakteriellen Vaginose wie unangenehmer Geruch und verstärkter Ausfluss werden gelindert. Einem Wiederauftreten bakterieller Vaginosen kann vorgebeugt werden. Nach erfolgreicher Behandlung einer Scheidenpilzinfektion kann das vaginalmilieu mit KadeFungin® Milchsäurekur regeneriert werden. Das Gel ist außerdem mit pH 4 optimal auf den natürlich physiologischen pH-Wert der Scheide abgestimmt.

Auch während der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet.

KadeFungin® Milchsäurekur beeinträchtigt nicht die Sicherheit von Kondomen.

Inhaltsstoffe

KadeFungin® Milchsäurekur ist gynäkologisch und dermatologisch getestet. Das Gel ist frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen.

Zusammensetzung

(S)-Milchsäure, Natriumlactat-Lösung, Hydroxyethylcellulose, Propylenglycol, Glycerol, gereinigtes Wasser.

KadeFungin® Milchsäurekur ist als Kurpackung mit 7 gebrauchsfertigen Einmal-Applikatoren à 2,5 g entnehmbare Menge Gel erhältlich.

KadeFungin® Milchsäurekur muss nicht kühl gelagert werden.

Das Verfalldatum ist auf der Faltschachtel / Folienverpackung aufgedruckt. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum.


CE 0482

Wünschen Sie weiterführende Informationen oder haben Sie Fragen zum Thema Scheidengesundheit? Dann füllen Sie bitte einfach den Anforderungscoupon auf der Rückseite aus und senden diesen


- per Fax an 030-720 82 199 oder
- per Post an Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH, Rigistraße 2, 12277 Berlin.

Anwendungshinweise


1. Schlagen Sie den Applikator mehrmals wie ein Fieberthermometer aus, damit sich das Gel an der Applikatortspitze sammelt.

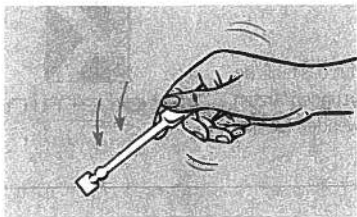

2. Drehen Sie die Verschlusskappe ab.

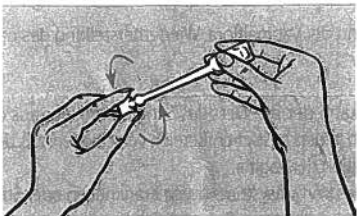

3. Führen Sie den Applikator vorsichtig in die Scheide ein. Dies geschieht am besten sitzend oder in Rückenlage bei leicht angezogenen Beinen. Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger fest auf das Gelreservoir, während Sie den Applikator langsam aus der Scheide ziehen. So wird das Gel gleichmäßig appliziert.

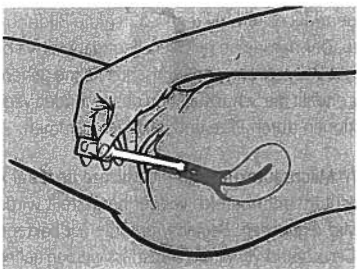

Hinweis

Die Konstruktion des Applikators garantiert, dass die empfohlene Menge an Gel angewendet werden kann. Bei richtiger Handhabung bleibt nach der Anwendung eine Restmenge an Gel im Applikator zurück.

Es handelt sich um eine 7-Tage-Kurpackung. Bitte wenden Sie täglich – am besten vor dem Schlafengehen – einen Applikator an, sofern Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker nichts anderes empfohlen hat.

Nach Antibiotikabehandlung/nach Behandlung eines Scheidenpilzes

Mit einer 7-tägigen Kurpackung KadeFungin® Milchsäurekur wird die natürliche Vaginalflora stabilisiert und einer erneuten Infektion vorgebeugt.

In der Schwangerschaft

Erhöhte pH-Werte werden mit einer 7-Tage-Kur KadeFungin® Milchsäurekur reguliert.

Erhaltung der natürlichen Balance bei Neigung zu bakterieller Vaginose

Zur Erhaltung des natürlich sauren Milieus kann nach jeder Menstruation für 2-3 Tage je 1 Applikator mit KadeFungin® Milchsäurekur angewendet werden.

Bitte beachten Sie

Bei bekannten Überempfindlichkeiten gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe wenden Sie das Produkt bitte nicht an. Zu Beginn der Therapie kann die Anwendung des Gels aufgrund des veränderten Scheidenmilieus und einer damit verbundenen höheren Empfindlichkeit leichtes Brennen hervorrufen. Mit zunehmender Regeneration des sauren Milieus wird dies nicht mehr auftreten. Sollte es dennoch zu Unverträglichkeitsreaktionen kommen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Der saure pH-Wert des Gels verringert die Aktivität der Spermien. Das Gel ist jedoch nicht zur Empfängnisverhütung geeignet.

Ein paar Tipps zur Intimpflege

Wählen Sie:

- KadeFungin® Milchsäurekur zur Regeneration nach Infektionen oder bei unangenehmem Scheidengeruch und in der Schwangerschaft
- atmungsaktive Unterwäsche
- nur Unterwäsche aus Geweben, die sich bei 60 °C waschen lassen

Vermeiden Sie:

- Seifen und Duschgele, die Duft- und Farbstoffe oder Konservierungsmittel enthalten sowie einen basischen pH-Wert aufweisen.
- Scheidenspülungen und Intimdeos

Darauf sollten Sie achten:

- Eine Intimirasur und Epilation schwächen die Barrierefunktion der Schamhaare.
- Vermeiden Sie ungeschützten Sexualverkehr mit fremden oder neuen Sexualpartnern. Hierbei können leichte vorübergehende, aber auch schwere Krankheiten übertragen werden.

Bei Fragen können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben an:

info@kade.de

Möchten Sie mehr zu diesem Thema erfahren?

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.kadefungin.de**

Diese Gebrauchsanweisung wurde erstellt im Mai 2009.



- Ja, bitte senden Sie mir kostenlos die Informationsbroschüre „Das betrifft viele Frauen“ zu.
- Ja, ich möchte weiterhin über Neuigkeiten der Firma Dr. Kade informiert werden.
- Meine Frage:

Persönliche Angaben:

Vorname, Name _____
Alter _____
Straße, Hausnummer _____
PLZ, Ort _____

Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben (Datenschutzerklärung gem. § 4 BDSG).



profemina
Gesundheit
für die Frau



Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2, 12277 Berlin