



Der O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> ist ein Geräteset, das speziell dafür entworfen ist, parasitische Zecken von der Haut von Tieren und Menschen zu entfernen.

- Er entfernt alle Zecken, egal welche Größe und Bissstelle.
- Wenn er richtig bedient wird, bleiben keine Mundteile der Zecke in der Haut stecken.
- Der Bauch der Zecke wird nicht gedrückt, also verringert er das Risiko einer Übertragung von Krankheitserregern (Borreliose, Babesiose, usw.).
- Er funktioniert ohne Chemikalien (Alkohol, Äther, usw.).
- Er ermöglicht eine schnelle und schmerzlose Zeckenentfernung.

## WARUM IST ES SO WICHTIG, ZECKEN ZU ENTFERNEN?

Zecken sind Parasiten, die sich von Menschen- oder Tierblut ernähren.



Während sie Blut einsaugen, können Zecken gefährliche Krankheiten übertragen, da manche Krankheitserreger in sich tragen.

Leider ist in den letzten Jahren die Zahl der infizierten Zecken stark gestiegen.

**Um das Risiko einer Krankheit zu vermindern, soll eine Zecke so schnell wie möglich entfernt werden, ohne die Mundteile zu zerreißen, ohne ihren Körper zu drücken und ohne sie vorher zu töten.**


Zeckenstiche können durch Insektenschutzmittel verhindert werden, aber solche Mittel können keinen vollen Schutz garantieren.

## WARUM DER O'TOM<sup>®</sup> / TICK TWISTER<sup>®</sup>?

Es ist grundwichtig, dass man die Zecke bei der Entfernung nicht zerdrückt, da dies das Risiko eines Rückflusses von Speichel erhöht, der zu Infektionen und/oder Allergien führen kann.

Pinzetten und andere solche Instrumente üben Druck auf die Zecke aus. Die Gestalt des O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> Hakens, der von einem Tierarzt entworfen wurde, berücksichtigt auch die Morphologie der Zecke.


Das Hypostom der Zecke (die Mundwerkzeuge, die in die Haut eingeführt werden) ist komplett von Haken besetzt, mit denen die Zecke sich in der Haut verankert. Wenn Sie die Zecke aufwärts ziehen, entfalten sich diese Haken und klemmen die Mundteile fest in die Haut ein. Das kann dazu führen, dass die Mundteile der Zecke abgerissen werden, was wiederum Schmerz und Infektion auslöst. Mit O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> klappen die Haken in Richtung der Drehachse ein. Damit ist die Zecke leicht zu entfernen, und zwar ohne Zugkraft, was das Risiko eines abgerissenen Hypostoms vermindert.

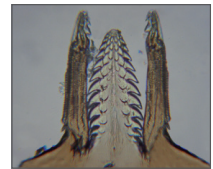

**Der Tick Twister<sup>®</sup> / O'TOM<sup>®</sup> Haken ist der einzige Zeckenentferner, der es dem Benutzer möglich macht, die Zecke zu greifen, ohne ihren Körper zu zerdrücken, und die Zecke durch eine Drehbewegung statt durch Ziehen zu entfernen. Diese Methode ist am besten dazu geeignet, Zecken komplett und schmerzlos zu entfernen.**



## BEDIENUNG

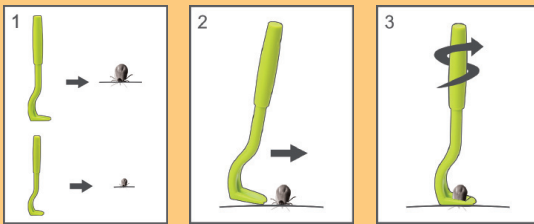

1. Wählen Sie den geeignetsten Haken aus, je nach Zeckengröße.
2. Lassen Sie den Haken einrasten, indem Sie sich der Zecke seitlich nähern, bis sie durch den Haken festgehalten wird.
3. Heben Sie den Haken sehr leicht und DREHEN Sie ihn.

## PATENTE & MARKEN

Die O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> Haken sind durch die internationalen Patente N° EP 0 821 571 und USP 5.876.409 geschützt.

Je nach Land und Vermarktungsgegend wird das Produkt unter dem Markennamen O'TOM<sup>®</sup> oder Tick Twister<sup>®</sup> geführt. Sowohl O'TOM<sup>®</sup> als auch Tick Twister<sup>®</sup> sind gesetzlich geschützte Marken und das Eigentum von H3D.



## AUS WELCHEM MATERIAL WIRD DAS GERÄT HERGESTELLT?

Der O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> ist aus Polyacetal. Wir haben dieses Polymer gewählt, weil

- es widerstandsfähig ist,
- esbeständig ist gegen Alkohol, Ether, Lösungsmittel und andere Stoffe, die man vorher an Zecken angewendet haben mag,
- es nicht nichttoxisch und total recycelbar ist und verascht werden kann, ohne Chloridgas abzugeben.

## WER SAGT, DASS DER O'TOM<sup>®</sup> / TICK TWISTER<sup>®</sup> DER BESTE ZECKENENTFERNER IST?

**Experte.** Nach einer in dem Veterinary Record im Oktober 2006 veröffentlichte Umfrage wurde der O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> sowohl durch deren Autoren (Experten der Parasitologie) als auch die Tierärzte, die an der Umfrage teilgenommen hatten, vorgezogen und empfohlen.

“**Tier Bild Zeitung**” – O'TOM<sup>®</sup> wurde bei einem Vergleichstest der Zeitschrift auf Platz 1 gesetzt.

**DeZooFa** – Erster Preis für Neuheiten (2005, Deutschland)

**Gemeinnützige Vereine**, z.B. BADA (Borreliosis and Associated Diseases Awareness) aus Großbritannien.

**Und am wichtigsten: SIE.** Benutzer unseres Zeckenentferners liegt in Millionenhöhe – da müssen wir was richtig gemacht haben!

“Dieses Produkt ist grossartig. Sehr leicht zu bedienen!”  
B.E., Hundefriseur, UK

“Ich bin mit dem O'TOM-Haken sehr zufrieden. Er funktioniert super und macht die Zeckenentfernung sehr viel leichter. Schade nur, dass ich ihn so oft benutzen muss! Ein Gerät, das unglaublich einfach zum Benutzen ist. Nie wieder benutze ich eine Pinzette !” - B.G., Krankenschwester, USA

“Besser als andere Methoden.” - B.D., Pfleger, Germany

“Ich finde ihn sehr nützlich, um Zecken komplett zu entfernen, ohne die Zecke direkt anzufassen, was das Risiko einer Krankheitsübertragung vermindert.” - T.F., Tierarzt, USA

“Sehr einfach zu bedienen – der beste Zeckenentferner, den ich bislang benutzt habe” - J.C., Tierhalter, UK

“Die Zecken kommen sehr einfach raus. Das kleine Gerät ist super!”  
D.W., Wanderer, Irland

