



CRYOSPRAY

# WARZEN- ENTFERNER VEREISUNGSSPRAY

Packungsinhalt: 50 ml Aerosol-Dose:  
enthält Dimethyläther, Butan, Isobutan  
und Propan. 12 Einweg-Applikatoren.  
1 Gebrauchsinformation.

Cryospray Warzenentferner ist Teil  
des Carnation Fußpflegesortiments,  
professionell erforscht und  
entwickelt für die Fußpflege.  
Carnation ist ein eingetragenes  
Warenzeichen.



0120

50ml e

LÖSUNGSMITTEL:  
MISSBRAUCH  
KANN SOFORT  
TÖDLICH SEIN



HOCH-  
ENTZÜNDLICH



Carnation Warzenentferner ist eine schnelle, wirksame und einfache  
Anwendung zur Entfernung von Warzen.

Es wirkt durch schnelle Vereisung der Warze ohne Verwendung von Gels,  
Cremes oder Pflaster.

\*Eine Anwendung reicht normalerweise aus, damit sich die Warze innerhalb  
von 10-14 Tagen auflöst oder abfällt. Hartnäckige Warzen können 2-3  
Anwendungen notwendig machen.

## GEBRAUCHSINFORMATION VOR DER ANWENDUNG SORGFÄLTIG LESEN.

**VORSICHT:** Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht schützen und keinen  
Temperaturen über 50°C aussetzen. Behälter auch nach Entleerung nicht  
beschädigen oder verbrennen. Nicht vor offener Flamme oder entflammbarem  
Material sprühen. Von Feuerquellen fernhalten – während der Anwendung nicht  
rauchen. Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren.  
Nur gemäß Gebrauchsinformation anwenden. Missbrauch durch Konzentrierung  
und Inhalieren des Inhalts kann gefährlich oder tödlich sein. Kontakt mit den  
Augen vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Nicht anwenden bei Diabetes oder während der Schwangerschaft. Nur zur  
äußeren Anwendung. Immer einen Applikator bei der Anwendung verwenden –  
niemals direkt auf die Haut sprühen. Falsche Anwendung kann zu  
Vernarbungen, Verbrennungen von gesundem Gewebe oder Blindheit führen.  
Dieses Produkt niemals öfter als 3 mal für die gleiche Warze anwenden.  
Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren.

**Nie direkt auf die Haut sprühen. Nie sprühen, wenn der Applikator mit  
der Haut in Kontakt ist.**



Hersteller: Cuxson Gerrard & Co. Ltd., 125 Broadwell Road,  
Oldbury, West Midlands B69 4BF, England.



CRYOSPRAY

# WARZEN- ENTFERNER VEREISUNGSSPRAY

## Einfache Anwendung

1. Applikator fest an die Sprühdüse  
der Dose anbringen.
2. Schutzkappe entfernen und den  
Sprühknopf 3 Sekunden drücken.
3. Schutzkappe ersetzen und die  
Spitze des Applikators maximal  
30 Sekunden auf die Warze  
drücken.

Innerhalb von 10-14 Tagen löst sich  
die Warze auf, oder fällt ab.

## GEBRAUCHSINFORMATION VOR DER ANWENDUNG SORGFÄLTIG LESEN.

**Nie direkt auf die Haut sprühen.  
Nie sprühen, wenn der Applikator  
mit der Haut in Kontakt ist.**

ENTFERNT MIT EINER ANWENDUNG\*