

## Vividrin® ectoin® MDO®



Medizinprodukt

### Die natürliche Lösung bei allergischen und gereizten Augen

Vividrin® ectoin® MDO® ist eine isotonische Lösung und kann zur unterstützenden Behandlung sowie zur Vorbeugung von Symptomen bei einer allergischen Bindehautentzündung aufgrund von Tierhaar-, Hausstaubmilben oder Schimmelpilzallergien angewendet werden. Juckende, gereizte, rote oder tränende Augen werden effektiv gelindert. Vividrin® ectoin® MDO® ist auch zur Befeuchtung der Augen und für Daueranwender geeignet.

#### Produkt auf einen Blick

- Sehr gut verträglich
- Ohne Konservierungsstoffe und pufferfrei
- Für Schwangere und Stillende geeignet
- Für Kontaktlinsenträger und sensible Augen geeignet
- Für Daueranwender geeignet

### Wirksame Hilfe bei allergischer Bindehautentzündung

Vividrin® ectoin® MDO® mit dem natürlichen Inhaltsstoff Ectoin und Hyaluronsäure lindert schnell und effektiv die Symptome bei saisonaler oder ganzjähriger Bindehautentzündung. Ectoin ist ein natürliches, zellschützendes Molekül mit entzündungslindernden Eigenschaften, das gereizte und allergische Augen auf natürliche Weise beruhigt und befeuchtet.





## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Entfernen Sie vor jeder Anwendung die Schutzkappe von der Spitze der Flasche. Achten Sie darauf, dass Sie die Tropfspitze nicht mit Ihren Fingern berühren. Legen Sie Ihren Daumen auf die ergonomische Daumenauflage, und umschließen Sie den unteren Teil der Flasche mit den anderen Fingern. Zwei Finger sollten Sie dabei am Boden der Flasche platzieren.

Drehen Sie die Flasche um und halten Sie sie so, wie auf der Abbildung 3 gezeigt. Wenn Sie die Pumpe zum ersten Mal verwenden, sind erst einige Pumpbewegungen notwendig. Drücken Sie dazu die Daumenauflage etwa sieben Mal herunter, bis der erste Tropfen erscheint.

Neigen Sie den Kopf zum Einträufeln des Tropfens etwas nach hinten und halten Sie die Flasche senkrecht über Ihr Auge. Ziehen Sie Ihr unteres Augenlid mit einem Finger Ihrer freien Hand leicht nach unten. Drücken Sie vorsichtig auf die Daumenauflage, um einen Tropfen in das Auge einzutropfen. Schließen Sie anschließend das Auge, bewegen Sie es leicht nach rechts und links und blinzeln Sie, um den Tropfen optimal auf der Augenoberfläche zu verteilen. Wenn Sie möchten, können Sie die andere Hand zur Unterstützung und für eine bessere Genauigkeit beim Eintropfen hinzunehmen. Achten Sie darauf, dass die Tropfspitze nicht mit Ihren Augen oder Fingern in Berührung kommt, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu vermeiden. Setzen Sie sofort nach jeder Anwendung die Schutzkappe der Flasche wieder auf die Flaschenspitze.

Wiederholen Sie die Anwendung am anderen Auge.

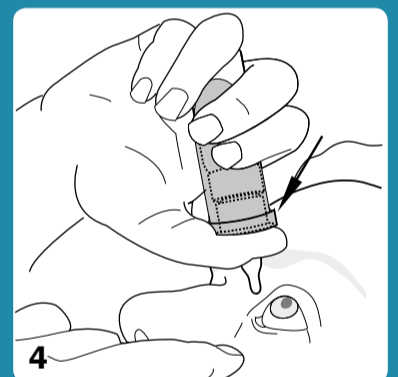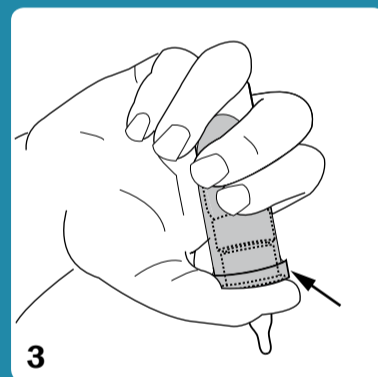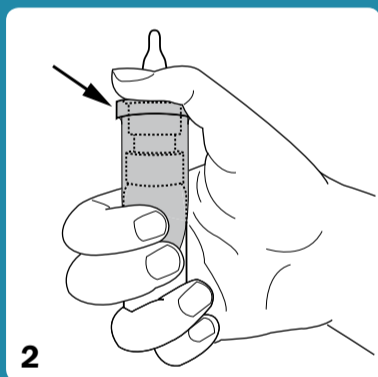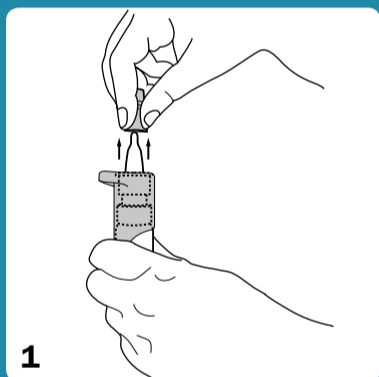

### BERUF UND FREIZEIT

Allergische Bindehautentzündung ist keine Seltenheit. Laut Schätzungen sind etwa 25% der Bevölkerung mindestens einmal im Leben davon betroffen. Vividrin® ectoin® MDO® sorgt für Linderung und hilft damit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden in Job und Freizeit wieder herzustellen.

### FÜR KONTAKTLINSENTRÄGER

Vividrin® ectoin® MDO® Augentropfen mit dem natürlichen Inhaltsstoff Ectoin und Hyaluronsäure ist auch für Menschen mit empfindlichen Augen und Kontaktlinsenträger geeignet. Die Augentropfen können direkt während des Tragens von Kontaktlinsenträger angewendet werden.

### FÜR SCHWANGERE UND STILLENDE

Auch in der Schwangerschaft und der darauffolgenden Stillzeit bleiben wir von allergischen Einflüssen nicht verschont. Juckende, gereizte, rote und tränende Augen sind im Falle einer Schwangerschaft eine zusätzliche Belastung. Vividrin® ectoin® MDO® kann unbedenklich in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

## HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

#### Wie wird Vividrin® ectoin® MDO® Augentropfen aufbewahrt?

Vividrin® ectoin® MDO® sollte bei 2–25°C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

#### Wie lange kann ich die angefangene Tropfflasche noch verwenden?

Vividrin® ectoin® MDO® kann nach dem Öffnen 6 Monate lang verwendet werden. Aus hygienischen Gründen sollte die Tropfflasche allerdings nur von einer Person angewendet werden.

#### Muss ich irgendetwas beachten, wenn ich noch andere Augenprodukte verwende?

Es sind keine Wechselwirkungen zwischen Vividrin® ectoin® MDO® und anderen Augentropfen oder lokal am Auge angewendeten Präparaten bekannt. Warten Sie nach der Anwendung von Vividrin® ectoin® MDO® mindestens 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Medizinprodukt oder Arzneimittel am Auge anwenden.