

ialuxid[®]



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Lesen Sie die Gebrauchsinformation sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Was ist ialuxid[®] Gel und wofür wird es angewendet?

ialuxid[®] Gel ist ein Medizinprodukt zur äußerlichen Anwendung. Es mindert das Risiko bakterieller Infektionen bei Akne, Follikulitis, Nagelbettentzündungen, Impetigo und Dellwarzen. Das Gel bildet einen Schutzfilm auf den betroffenen Hautstellen und verhindert so die Vermehrung von Keimen.

Wie ist ialuxid[®] Gel anzuwenden?

Nach Reinigung der Haut das Gel mehrmals täglich gleichmäßig auf die betroffenen Stellen auftragen.

Inhaltsstoffe

AQUA, CARBOMER, HYDROGEN PEROXIDE, XANTHAN GUM, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, SODIUM HYDROXIDE, SQUALANE, GLYCINE, SODIUM HYALURONATE, POLYSORBATE 60, OXYQUINOLINE SULFATE, SORBITAN ISOSTEARATE.

Was sollten Sie vor der Anwendung von ialuxid[®] Gel beachten?

- ialuxid[®] Gel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.
- ialuxid[®] Gel ist nur zum Auftragen auf die Haut bestimmt.
- Nicht auf Wundnähte auftragen.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich kaltem Wasser spülen.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

ialuxid[®] Gel ist im Allgemeinen gut verträglich. Bei empfindlicher Haut kann es zu Beginn ein leichtes Brennen oder Spannungsgefühl hervorrufen. Bei septischen Wunden entscheidet Ihr Arzt, ob eine lokale oder systemische Behandlung mit einem Antibiotikum notwendig ist. Bei Unverträglichkeit informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie ist ialuxid[®] Gel aufzubewahren?

- für Kinder unzugänglich aufbewahren
- trocken aufbewahren, vor direkter Hitze schützen
- nicht über 25 Grad Celsius lagern
- Tube nach Gebrauch wieder verschließen
- Haltbarkeitsdatum gilt bei richtiger Lagerung



Scannen Sie diesen QR-Code und erfahren Sie mehr über ialuxid[®] Gel und weitere Gynial SkinCare Produkte!
www.gynial.com



BMG Pharma S.p.A. | Viale Restelli 1 | 20124 Milan | Italy

CE 0476



Vertrieb Österreich: Gynial GmbH | Ungargasse 37/4/1 | 1030 Wien | www.gynial.com

Rev1, January 2020

under license of
BMG Pharma SPA



Zwischen 5 und 25 Grad Celsius lagern



Chargennummer



Ablaufdatum



CE Label ausgestellt durch die notifizierte Stelle 0476



Gebrauchsinformation beachten



Hersteller